

pracie vrecúško medi - návod na použitie

Jemná starostlivosť o kompresívne pančuchy

Kompresívne pančuchy sú zdravotníckou pomôckou. Vyžadujú si veľmi jemné zaobchádzanie, aby sa zabránilo poškodeniu štruktúry ich vlákna a zaistilo sa, že zostanú pri nosení poddajné a pružné.

Pracie vrecúško medi svojou špeciálnou sieťovinovou štruktúrou ochraňuje pleteninu pred vonkajším poškodením a zároveň zaisťuje optimálne vypratíe od nečistoty.

Inštrukcie pre správne pranie kompresívnych pančúch:

- Svoje kompresívne pančuchy perte každý deň.
 - Kompresívne pančuchy môžete prať v práčke podľa symbolov ošetrovania uvedného na etikete produktu s využitím šetrného pracieho programu.
 - Pri praní používajte iba šetrné pracie prostriedky.
 - Nepoužívajte aviváž, pretože vlákna by stratili svoju pružnosť.
 - Nikdy nesaňte kompresívne pančuchy na slnku alebo na radiátore.
 - Nečistite prosím kompresívne pančuchy chemicky, nežehlite ich a nepoužívajte bieliadlo.
-

Kompresívne pančuchy strácajú pri nešetrnej starostlivosti postupne svoju elasticitu a tým pádom aj svoj účinok. Doba používania jedných kompresívnych pančúch by nemala prekročiť dĺžku 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby by ste si mali zaobstaráť nový kompresívny výrobok.