

SWING®

ENERGIA PER LE TUE GAMBE



CZ Zdravotní podpůrné punčochy

Podpůrné punčochové zboží medi SWING® dokonale spojuje kompresi, lehkost a eleganci v jednom výrobku. Produkty medi SWING® napomáhají návratu žilní krve, čímž zmírňují pocit únavy a těžkosti nohou a přináší zdravé a krásné nohy. Módní barvy a varianty dělají z punčochového zboží medi SWING® nejlepší volbu pro nejnáročnější ženy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Punčochy medi SWING® si nasadte hned, jak ráno vstanete.

Dávejte pozor na ostré nehty a prsteny!

Zacházejte s punčochami opatrně, abyste nepoškodili jejich jemnou pleteninu.

Při navlékání punčoch byste měli ideálně používat gumové rukavice.

1. Nahrňte délku punčochy do rukou až po chodidlovou část.
Vložte nohu dovnitř a zkontrolujte, zda je pata ve správné poloze.
2. Nyní rovnoměrně rozložte punčochu nahoru přes koleno a pak přes stehno, dokud správně nepadne.
3. Nyní zkontrolujte, zda je punčocha správně umístěna.

INDIKACE

- Prevence žilních a lymfatických onemocnění.
- Prevence otoků nohou a pavoučích žil v těhotenství.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE

Pokročilé periferní arteriální okluzivní onemocnění, lymfedém, septická flebitida, těžká flebitida, lymfangitida, pokročilá neuropatie (např. diabetes mellitus), nesnášenlivost materiálu kompresivních punčoch.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE

Vředy a otevřené rány, mokvající dermatózy, imobilita, stázová dermatitida, inkontinence velkých chlopní hlubokého a povrchového žilního systému, žilní trombóza nebo akutní tromboflebitida, posttrombotický syndrom.

UPOZORNĚNÍ

- V případě, že se během používání výrobku objeví bolesti nebo podráždění kůže, okamžitě punčochu sundejte a poraďte se s lékařem nebo odborným prodejcem.
- Pokud není pokožka suchá, naneste na chodidlo trochu tělového pudru, abyste usnadnili oblékání punčochy.
- Při oblékání punčoch používejte gumové rukavice.
- Pozornost věnujte také vnitřní struktuře obuvi, protože vadná podšívka nebo vycpávka zvyšuje tření a může dojít k poškození punčochy.
- Před použitím punčochy nepoužívejte masti nebo krémy, protože by mohly poškodit přízi.
- Nedoporučuje se používat punčochy během spánku v noci.

SLOŽENÍ

POLYAMID (PA), ELASTAN (EA)

POKYNY K PRANÍ

- Perte denně v ruce.
- Používejte tekuté a neutrální mýdlo bez bělicích prostředků a změkčovačel.
- Nesušte v sušičce.
- Nežehlete.



Ruční praní



Něžehlit



Nebělit



Nečistit chemicky



Nesušit v bubnové sušice

V případě jakékoliv reklamace týkající se tohoto zdravotnického prostředku si prosím uschovejte číslo šarže na tomto obalu.

SWING®

ENERGIA PER LE TUE GAMBE

medi

SK Zdravotné podporné pančuchy

Podporné pančuchové produkty medi SWING® dokonalo spájajú kompresiu, ľahkosť a eleganciu v jednom výrobku. Produkty medi SWING® napomáhajú návratu žilovej krvi, čím zmiernujú pocit únavy, ťažkosti nôh a prinášajú zdravé a krásne nohy. Módne farby a varianty robia z pančuchového tovaru medi SWING® najlepšiu voľbu pre najnáročnejšie ženy.

NÁVOD K POUŽITIU

Pančuchy medi SWING® si nasadíte hneď, ako ráno vstanete.

Dávajte pozor na ostré nechty a prstene!

Zaochádzajte s pančuchami opatrne, aby ste nepoškodili ich jemnú pleteninu.

Pri navliekaní pančúch by ste mali ideálne používať gumové rukavice.

1. Nahrňte dĺžku pančuchy do rúk až po chodidlovú časť.

Vložte nohu do vnútra a skontrolujte, či je päta v správnej polohe.

2. Teraz rovnomerne rozložte pančuchu nahor cez koleno a potom cez stehno, dokým správne nepadne.

3. Teraz skontrolujte, či je pančucha správne umiestnená.

INDIKÁCIE

- Prevencia žilových a lymfatických ochorení.
- Prevencia opuchov nôh a pavúčich žíl v tehotenstve.

ABSOLÚTNA KONTRAINDIKÁCIA

Pokročilé periférne arteriálne okluzívne ochorenie, lymfédém, septická flebitída, ťažká flebitída, lymfangitída, pokročilé neuropatie (napr. diabetes mellitus), neznášanlivosť materiálu kompresívnych pančúch.

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE

Vredy a otvorené rany, mokvajúce dermatózy, imobilita, stázová dermatitída, inkontinencia veľkých chlopní hlbokého a povrchového žilového systému, žilová trombóza alebo akútna tromboflebitída, posttrombotický syndróm.

UPOZORNENIE

- V prípade, že sa behom používania výrobku objavia bolesti alebo podráždenie kože, okamžite pančuchu vyzlečte a poraďte sa s lekárom alebo odborným predajcom.
- Pokiaľ nie je pokožka suchá, naneste na chodidlo trochu telového pudru, aby ste uľahčili obliekanie pančuchy.
- Pri obliekaní pančúch používajte gumové rukavice.
- Pozornosť venujte takisto vnútornej štruktúre obuvi, pretože chybná podšívka alebo vypchávka zvyšuje trenie a môže dôjsť k poškodeniu pančuchy.
- Pred použitím pančuchy nepoužívajte masť alebo krémy, pretože by mohli poškodiť priadzu.
- Nedoporučuje sa používať pančuchy v noci behom spánku.

ZLOŽENIE

POLYAMID (PA), ELASTAN (EA)

POKYNY K PRANIU

- Perte denne v rukách.
- Používajte tekuté a neutrálne mydlo bez bieliacich prostriedkov a zmäčkovadiel.
- Nesušte v sušičke.
- Nežehlíte.

MD CE



Ručné pranie



Nežehliť



Nebieliť



Nečistiť chemicky



Nesušiť v bubnovej sušičke

V prípade akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa tohto zdravotníckeho prostriedku si prosím uschovajte číslo šarže na tomto obale.